

Desinfektionsplan Medical

	Was	Womit	Wann	Wie	Zubereitung der Lösung
	Händewaschen	esemtan® wash lotion	Vor Arbeitsbeginn, nach Arbeitsende, nach Toiletten- gang, bei sichtbar verschmutzten Händen	Vor dem Einseifen die Hände mit lauwarmem Wasser (nicht heissem Wasser) an- feuchten, Waschlotion auftragen und ca. 10 Sekunden über die gesamten Hände inkl. Fingerzwischenräume verteilen. Gründlich abspülen und mit weichen Einmalhandtuch abtrocknen.	Gebrauchsfertige Waschlotion Wie handelsübliche Präparate anwenden
	Händedesinfektion	desderman® care / gel, desmanol® pure / gel	Vor und nach Behandlung, bei sichtbarer Verschmutzung, vor und bzw. nach Benutzung von Handschuhen	Hygienische Händedesinfektion: 30 Sekunden in den Händen einreiben Chirurgische Händedesinfektion: 90 Sekunden in den Händen einreiben	Fertige Gebrauchslösung Keine Wasserzugabe
	Handpflege Handschutz	esemtan® skin lotion, sensiva® protective cream	Vor grossen Pausen, nach Arbeitsende	Die Lotion oder Schutzcreme nach dem Händewaschen und/oder der Hände- desinfektion auf die sauberen und trockenen Handrücken auftragen und zuerst Handrücken auf Handrücken, dann die Handinnenflächen eincremen.	Gebrauchsfertige Handlotion
	Hautdesinfektion	kodan® forte farbl./gefä., octeniderm®	Vor operativen Eingriffen, Injektionen und Punktionen	Betreffende Hautstelle mit Desinfektionsmittel benetzen und einwirken lassen. Injektionen: 15 Sekunden. Punktionen: 60 Sekunden	Fertige Gebrauchslösung Keine Wasserzugabe
	Schleimhaut-, Wund-, und Hautdesinfektion, Verbrennungen	octenisept®	Vor diagnostischen und operativen Massnahmen, zur Wundbehandlung	Mit Tupfer auftragen, die zu desinfizierenden Stellen vollständig benetzen und 1 Minute einwirken lassen.	Gebrauchsfertige, wässrige Lösung
	Mundschleimhautantiseptik	octenimed® Gurgel- & Mundspüllösung gebrauchsfertige antiseptische Mundspül- lösung mit dem Wirkstoff Octenidin	zur kurzzeitigen Desinfektion der Mundschleimhaut.	2 bis 3 mal täglich unverdünnt anwenden. Für mind. 30 Sekunden mit jeweils 10–20 ml den Mund spülen oder gurgeln. Nicht schlucken. Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.	Gebrauchsfertige Gurgel- & Mundspüllösung
	Allgemeine Instrumente (z. B. Pinzetten, Scheren, Zangen)	gigasept® instru AF	Nach jedem Gebrauch	Instrumente einlegen, nach 30 Minuten Einwirkzeit mechanisch reinigen, abspülen und ggf. sterilisieren. Die Einsatzkonzentration / Einwirkzeit nach EN / prEN lautet: 3,0% – 15 Min., 2,0% – 30 Min., 1,5% – 60 Min. Im Ultraschall: 3,0% / 5 Minuten (Standzeit der Lösung 1 Tag).	2%ige Desinfektionslösung 20 ml gigasept® instru AF und 980 ml Wasser Einwirkzeit und Standzeit der Lösung beachten.
	Thermolabile Instrumente (z. B. Endoskope)	gigazyme® X-tra (desinfizierende Reinigung)	Nach jedem Gebrauch	Endoskope und Instrumentarium sofort nach Gebrauch in die 2 % gigazyme® X-tra Lösung einlegen. Auf vollständige Benetzung achten, auch bei Hohlkörper- instrumenten. Anschliessend die Endoskope und das Instrumentarium nach 15 Minuten Einwirkzeit mit Wasser gründlich abspülen / durchspülen.	2%ige Desinfektionslösung 20 ml gigazyme® X-tra auf 980 ml Wasser geben und gut durchmischen. Lösung täglich wechseln. Bei starker Verschmutzung vorher wechseln.
		gigasept® pearls (Desinfektion)	Nach jedem Gebrauch	Anschliessend nach Reinigung: Endoskope und Instrumentarium in die 2 % gigasept® pearls Lösung einlegen. Auf vollständige Benetzung achten und 10 Minuten einwirken lassen. Anschliessend die Endoskope und das Instrumentarium abspülen / durchspülen und ggf. sterilisieren.	2%ige Desinfektionslösung 20 g gigasept® pearls in 980 ml Wasser geben = 1 Liter Gebrauchslösung. Lösung täglich wechseln. Bei starker Verschmutzung vorher wechseln.
	Alkoholische Schnelldesinfek- tion von Medizinprodukten, Geräten, Mobiliar und Flächen aller Art	mikrozyd® AF liquid, wipes, wipes Jumbo, wipes premium	Nach jeder Benutzung	Oberflächen mit mikrozyd® AF gründlich wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit: 1 Minute	Alkoholische gebrauchsfertige Lösung / Tücher (Acrylglas, lackiertes Holz nicht mit mikrozyd® AF behandeln!)
	Schnelldesinfektion für alkoholempfindliche Oberflächen von Medizin- produkten, Geräten, Mobiliar und Flächen aller Art	mikrozyd® universal liquid, wipes green line, wipes premium	Nach jeder Benutzung von alkoholempfindlichen Flächen	Oberflächen mit mikrozyd® universal gründlich wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit: 1 Minute	Gering alkoholische gebrauchsfertige Lösung / Tücher
		mikrozyd® sensitive liquid, wipes, wipes premium	Nach jeder Benutzung von alkoholempfindlichen Flächen	Oberflächen mit mikrozyd® sensitive gründlich wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit: 1 Minute	Alkoholfreie gebrauchsfertige Lösung / Tücher
	Fussböden, Sanitärbereich, Inventar, Geräte und Mobiliar	terralin® protect	Täglich oder nach Kontamina- tion und Verschmutzung	Flächen feucht-nass abwischen / Handschuhe tragen. Einwirkzeit: 1 Stunde	0,5%ige Desinfektionslösung 5 ml Konzentrat auf 995 ml Wasser = 1000 ml Desinfektionslösung